
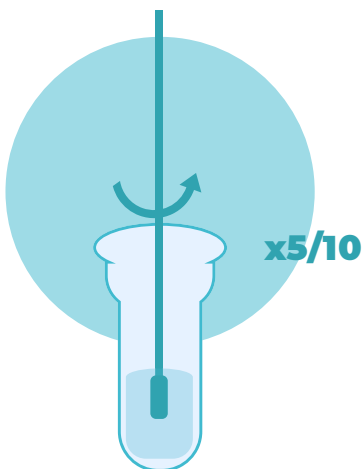


01 PRIMO PASSO

Inclinare la testa all'indietro e inserire il tampone orizzontalmente.

02 SECONDO PASSO

Ruotare delicatamente con un movimento circolare contro la mucosa nasofaringea per 10/15 secondi.


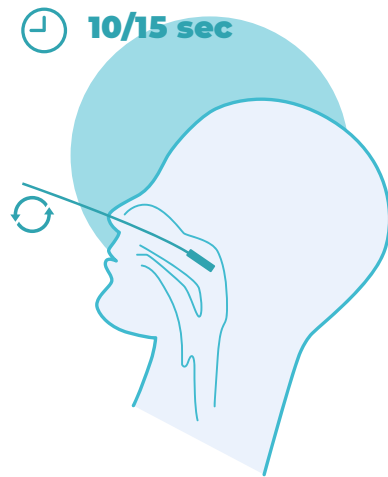


03 TERZO PASSO

Inserire il tampone nel buffer di estrazione. Ruotarlo e premerlo per 5/10 volte.

04 QUARTO PASSO

Estrarre il tampone stringendo la sua testa.

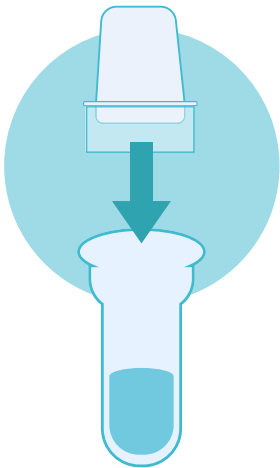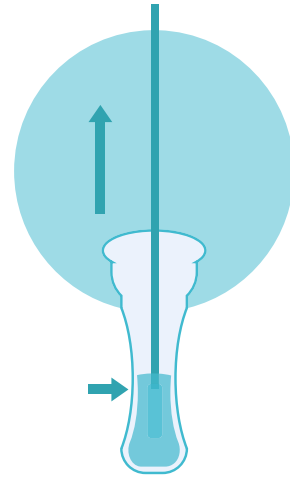


05 QUINTO PASSO

Chiudere il buffer di estrazione con il suo apposito tappo, in modo da sigillarlo bene.

06 SESTO PASSO

Rilasciare $3/4$ gocce nel pozzetto del dispositivo per poi attendere $5/8$ minuti il risultato.

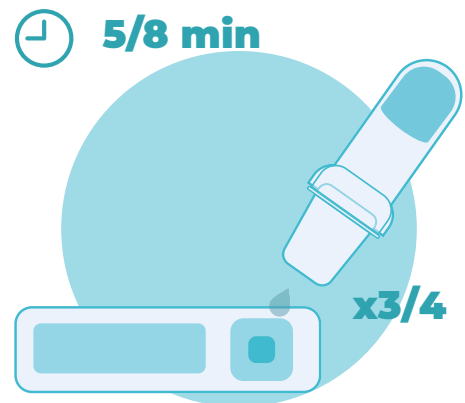



07

ANALISI RISULTATI

POSITIVO: Compare una linea nera nella regione T e una linea rossa nella regione C.

NEGATIVO: Compare la linea rossa solo nella regione C.

INVALIDO: Non compare nessuna linea. Il test è da rifare.

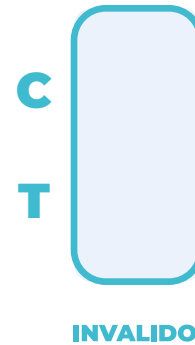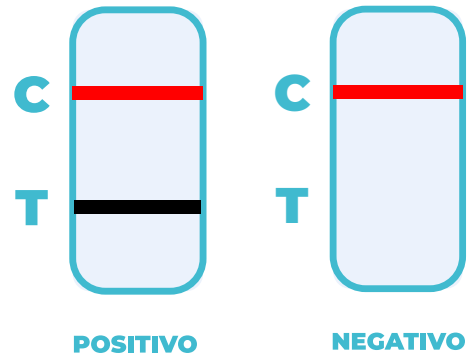

CONSERVAZIONE:

Il kit deve essere conservato a una temperatura di 1 - 40 C°.