
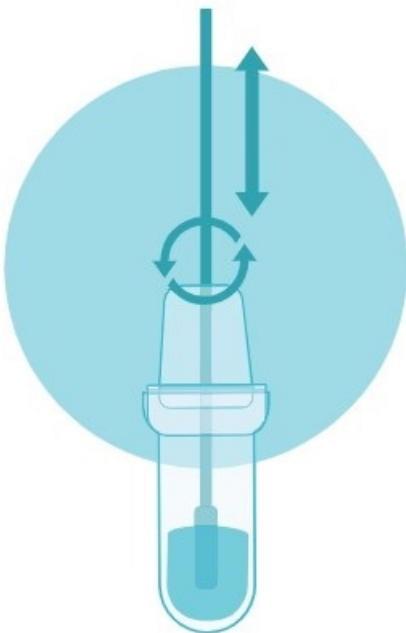


## 01 PRIMO PASSO

Inserire con attenzione il tampone all'interno della narice del paziente. La punta del tampone dovrebbe essere inserita per 2-4 cm all'interno della narice.

## 02 SECONDO PASSO

Ruotare delicatamente il tampone più volte lungo la mucosa della narice per assicurarsi che vengano raccolti sia il muco che le cellule. Rimuovere il tampone dalla narice ruotandolo delicatamente tra le dita.


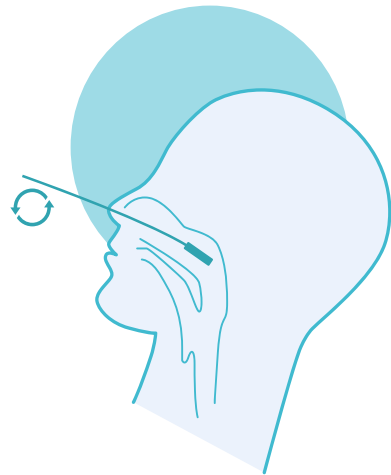


## 03 TERZO PASSO

Immergere il tampone nasale nella provetta e mescolare accuratamente con il liquido di estrazione mescolandolo e capovolgendolo su e giù per almeno 5 volte. Lasciare il tampone in ammollo per un minuto.

## 04 QUARTO PASSO

Estrarre il tampone stringendo la sua testa.

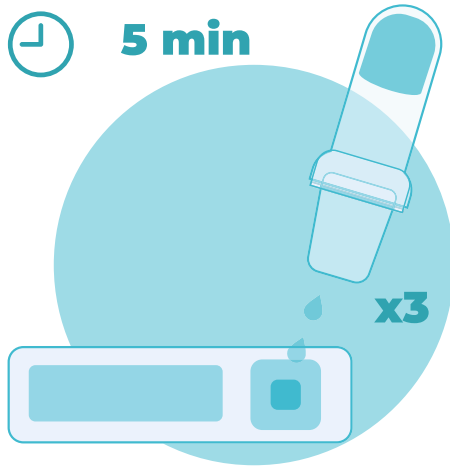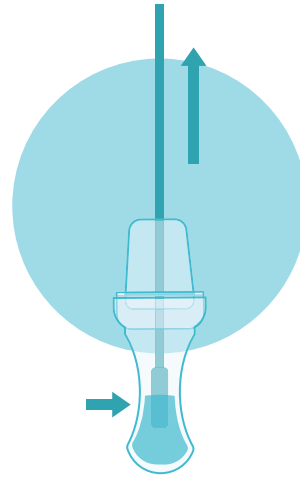

## 05 QUINTO PASSO

Applicare 3 gocce (circa 100 $\mu$ L) nella cella del campione del test a cassetta tramite la punta  
Interpretare i risultati del test dopo 5 minuti.  
Non interpretare i risultati oltre i 20 minuti.



# 06

## ANALISI RISULTATI

**POSITIVO:** Compare la linea nelle regioni T e C.

**NEGATIVO:** Compare la linea solo nella regione C.

**INVALIDO:** Non compare nessuna linea. Il test è da rifare.

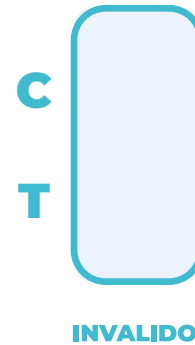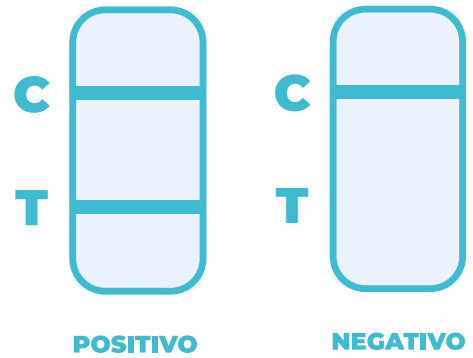

### CONSERVAZIONE:

Il kit deve essere conservato in una temperatura tra 2-30 °C.  
Non congelare.