



01 PRIMO PASSO

Rimuovi la cassetta dalla confezione. Effettuare il test entro 1 ora dalla sua rimozione, soprattutto se la temperatura ambientale è superiore a 30 °C.

02 SECONDO PASSO

Per il campione di siero/
plasma: prelievo di sangue.

Per il campione di sangue:
utilizzare il pungidito per
creare una micro ferita.
Posizionare l'ago sul dito e poi
spingere.

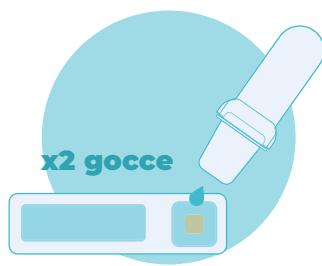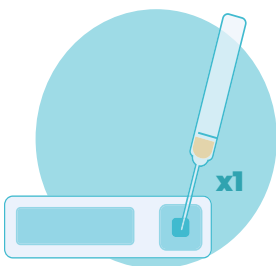



03 TERZO PASSO

CAMPIONE DI SIERO/PLASMA:
Aggiungere una goccia di
campione nel pozzetto e due
gocce di buffer di estrazione.

04 QUARTO PASSO

CAMPIONE DI SANGUE:

Aggiungere due gocce di sangue nel pozzetto e due gocce di buffer di estrazione.

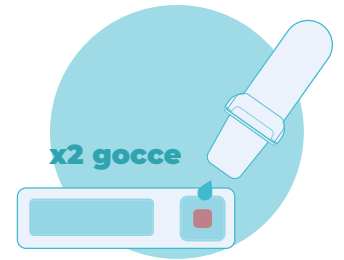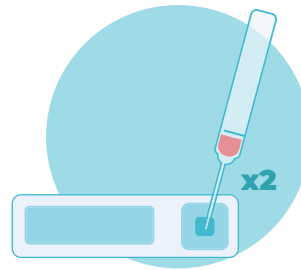

05 QUINTO PASSO

Il risultato del test potrà essere letto dopo 15 minuti.

Non leggere dopo 20 minuti.

CONSERVAZIONE:

Il kit deve essere conservato a una temperatura di 4 - 30 C°.



07

ANALISI **RISULTATI**

POSITIVO: Compare la linea nelle regioni C, IgG e IgM.

NEGATIVO: Compare la linea solo nella regione C.

INVALIDO: Non compare nessuna linea. Il test è da rifare.

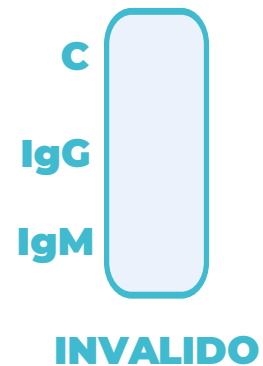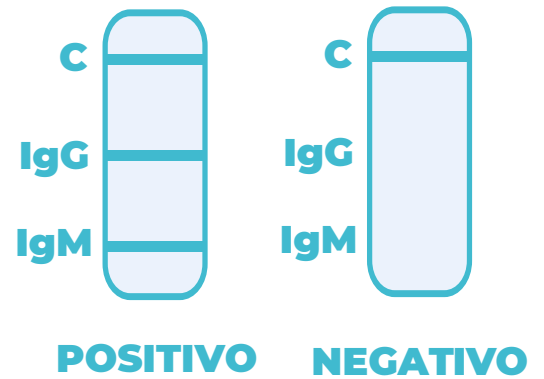

CONSERVAZIONE:

Il kit deve essere conservato a una temperatura di 4 - 30 C°.