
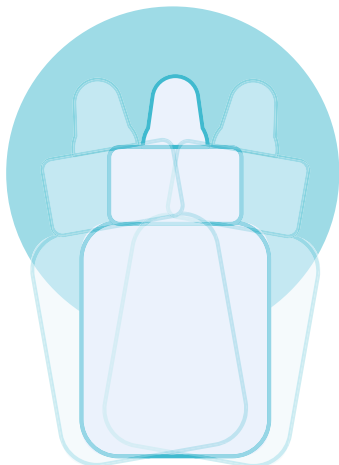


## 01 PRIMO PASSO

Inclinare la testa all'indietro e inserire il tampone orizzontalmente se si vuole effettuare un test **nasofaringeo**.

## 02 SECONDO PASSO

Oppure se si vuole effettuare un tampone **orofaringeo**, inclinare la testa all'indietro e mentre si emette il suono "Ah" inserire il tampone strofinando contro la parete faringea. Estrarre il tampone senza toccare altre pareti della bocca.


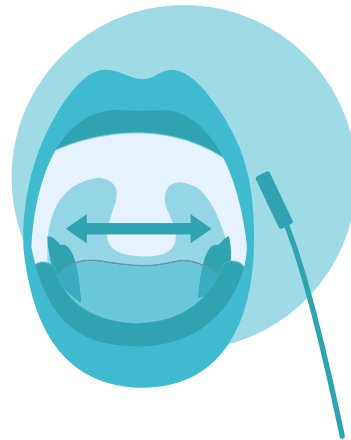


## 03 TERZO PASSO

Mescolare delicatamente il tampone agitando il flacone.

## 04 QUARTO PASSO

Senza toccare il bordo della provetta, aggiungere 10 gocce alla provetta di estrazione.

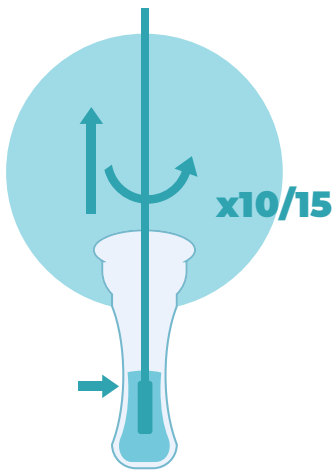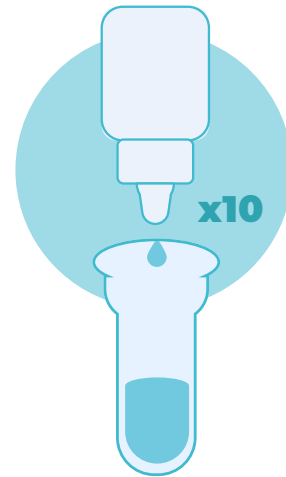


## 05 QUINTO PASSO

Inserire il tampone con il campione nella provetta e farlo ruotare 10/15 volte, schiacciando la testa del tampone.

## 06 SESTO PASSO

Attendere poi 2 minuti.



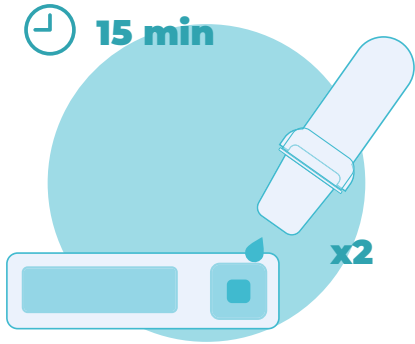

## 07 SETTIMO PASSO


Mettere il tappo contagocce alla provetta e aggiungere due gocce nel pozzetto della cassetta per poi attendere 15 minuti per il risultato.

## 08 ANALISI RISULTATI

**POSITIVO:** Comparire una linea nella regione T e una linea nella regione C.

**NEGATIVO:** Comparire la linea rossa solo nella regione C.

**INVALIDO:** Non comparire nessuna linea oppure comparire solo nella regione T. Il test è da rifare.

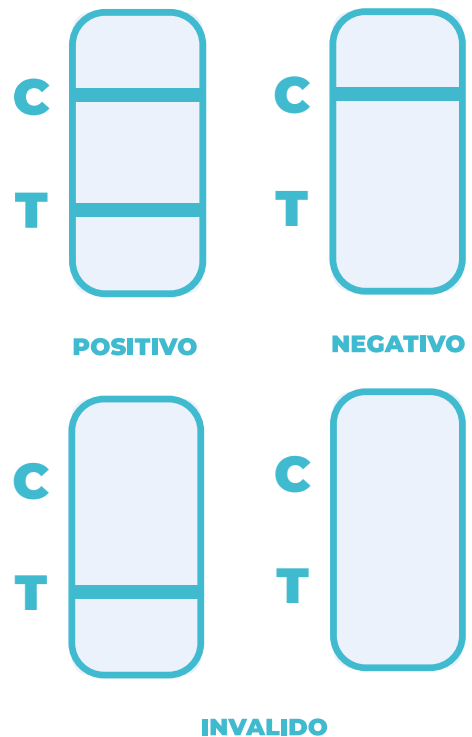

### CONSERVAZIONE:

Il kit deve essere conservato a una temperatura di 2 - 30 °C.

Se non testati subito, i tamponi con i campioni devono essere conservati a una temperatura di 2 - 8 °C.

Il test andrà però eseguito entro 24H.