



01 PRIMO PASSO

Inclinare la testa all'indietro e inserire il tampone orizzontalmente.

02 SECONDO PASSO

Ruotare circolarmente per 5 volte il tampone per narice.

Una volta rimosso, assicurarsi che la testa del tampone sia bagnata.

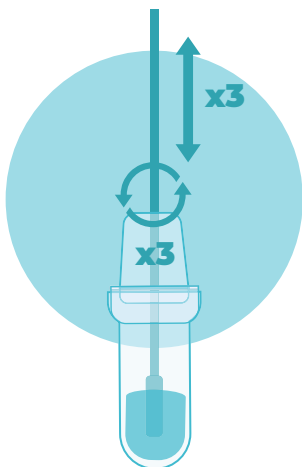
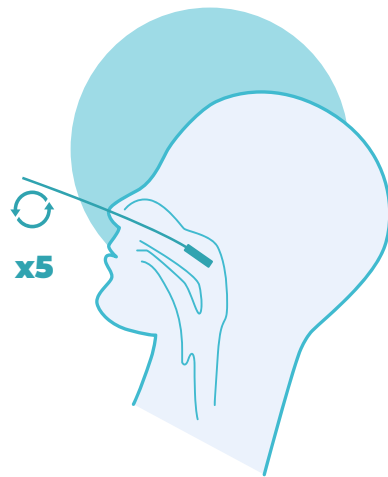


03 TERZO PASSO

Inserire il tampone nel buffer di estrazione. Ruotarlo e premerlo per 3 volte per circa 15 secondi.

04 QUARTO PASSO

Estrarre il tampone stringendo la sua testa.

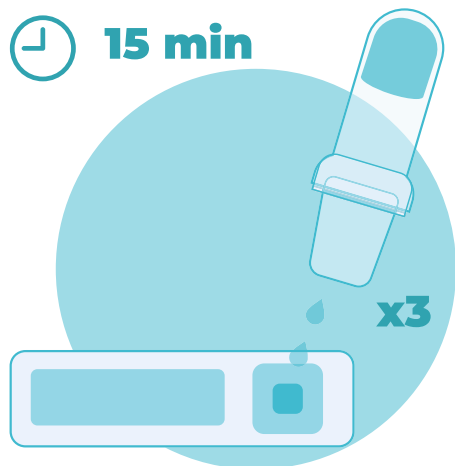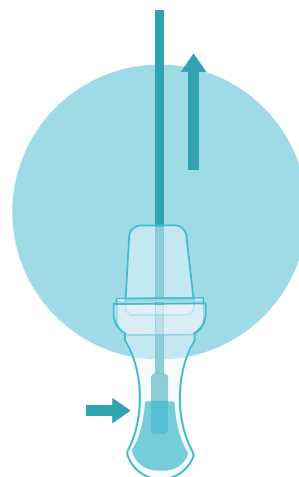

05 QUINTO PASSO

Estrarre il dispositivo dal sacchetto di alluminio e aspettare 15 minuti. Aggiungere 3/4 gocce del campione nel pozzetto e attendere 15 minuti.


06

ANALISI RISULTATI

POSITIVO: Comparare la linea nelle regioni T e C.

NEGATIVO: Comparare la linea solo nella regione C.

INVALIDO: Non compare nessuna linea. Il test è da rifare.

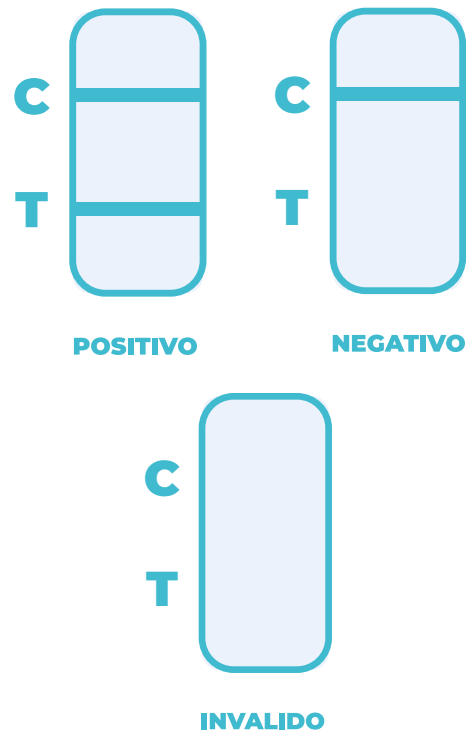

CONSERVAZIONE:

Il kit deve essere conservato a una temperatura di 4 - 30 °C.

Dopo l'apertura del sacchetto di alluminio, il presente kit deve essere utilizzato entro 30 minuti o immediatamente dopo l'apertura se la temperatura ambiente supera i 30 °C.