

TAMPONE OROFARINGEO




01 PRIMO PASSO


Inclinare la testa all'indietro e inserire il tampone orizzontalmente.

02 SECONDO PASSO

Emettere il suono "Ah" e inserire il tampone strofinando contro la parete faringea per 3 volte. Estrarre il tampone senza toccare altre pareti della bocca.

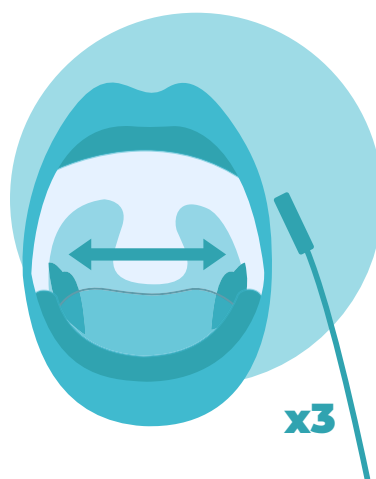

TAMPONE NASOFARINGEO


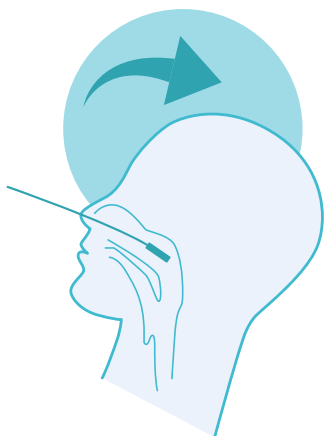


01 PRIMO PASSO

Inclinare la testa all'indietro e inserire il tampone orizzontalmente.

02 SECONDO PASSO

Lasciare il tampone all'interno della narice per 10/15 secondi.

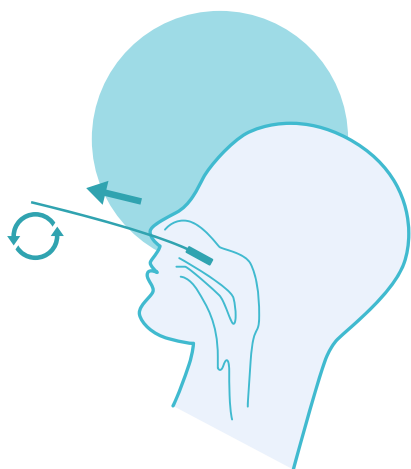
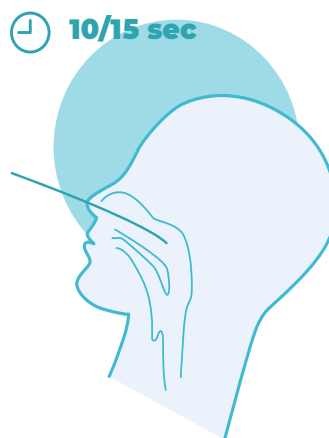


03 TERZO PASSO

Estrai il tampone delicatamente dalla narice continuando a ruotare.

04 QUARTO PASSO

Rimuovere il tampone dalla provetta e nel frattempo stringere la testa del tampone.

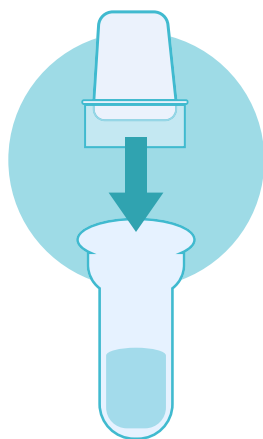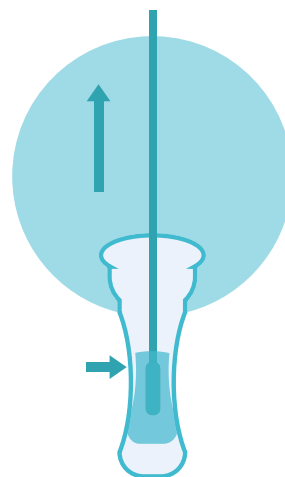




05 QUINTO PASSO

Chiudere la provetta con il tappo filtro.

06 SESTO PASSO

Rilasciare 3/4 gocce nel pozzetto del dispositivo e attendere 15/20 minuti il risultato.

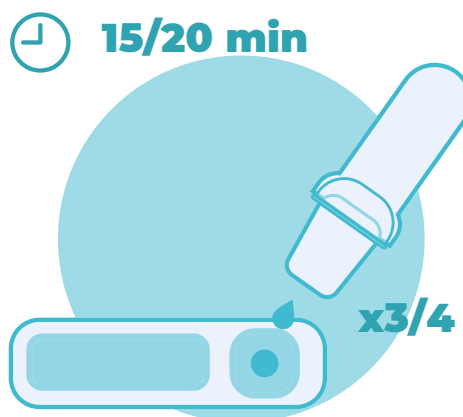

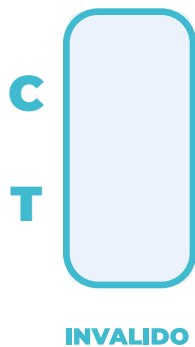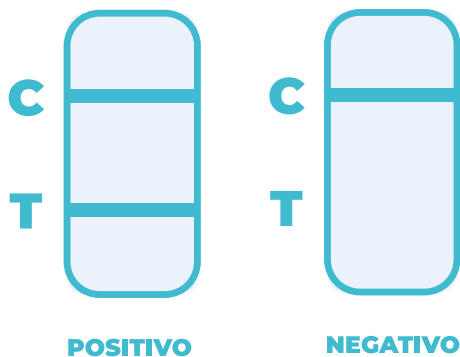

07 ANALISI **RISULTATI**

POSITIVO: Comparare la linea nelle regioni T e C.

NEGATIVO: Comparare la linea solo nella regione C.

INVALIDO: Non compare nessuna linea. Il test è da rifare.

CONSERVAZIONE:

Il kit deve essere conservato a una temperatura di 2 - 30 C°.
Non congelare.

La cassetta deve essere utilizzata entro 1 ora dalla sua apertura,
la soluzione del tampone deve essere richiuso dopo l'utilizzo.