
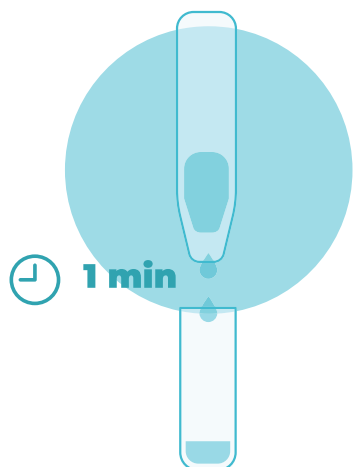


01 PRIMO PASSO

Espellere la saliva nell'apposito contenitore e prelevare il contenuto tramite il contagocce.

02 SECONDO PASSO

Usare la pipetta contagocce per trasferire 3 gocce all'interno della provetta.



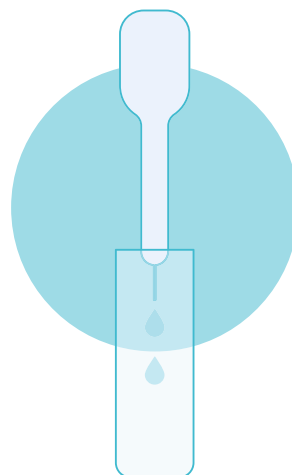


03 TERZO PASSO

Svitare il coperchio del tampone di estrazione e aggiungere il contenuto dentro la provetta. Oscillare piano per poi attendere 1 minuto e riprendere l'oscillazione.

04 QUARTO PASSO

Rilasciare 3 gocce di saliva nel pozzetto della saponetta e attendere MAX 15 minuti.

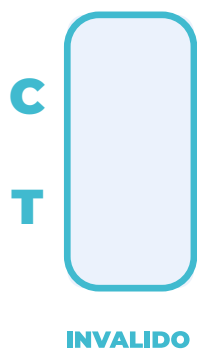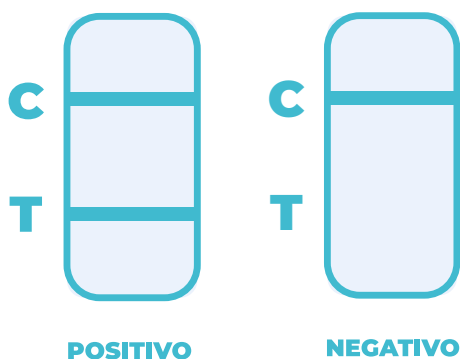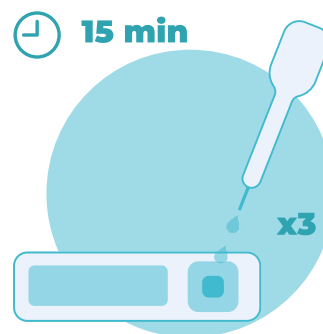

05 ANALISI RISULTATI

POSITIVO: Comparare la linea nelle regioni T e C.

NEGATIVO: Comparare la linea solo nella regione C.

INVALIDO: Non compare nessuna linea. Il test è da rifare.

CONSERVAZIONE:

Il kit deve essere conservato a una temperatura di 2 - 30 C°.